

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO



Lavado a mano



No blanquear



Secar colgado



No exprimir



No planchar




No secar a máquina



PRODUCTOS MEDICOS,  
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION

## FÉRULA DE PAVLICK PEDIÁTRICA MOD. 48960

### PARTES QUE COMPONEN EL ARNÉS DE PAVLICK

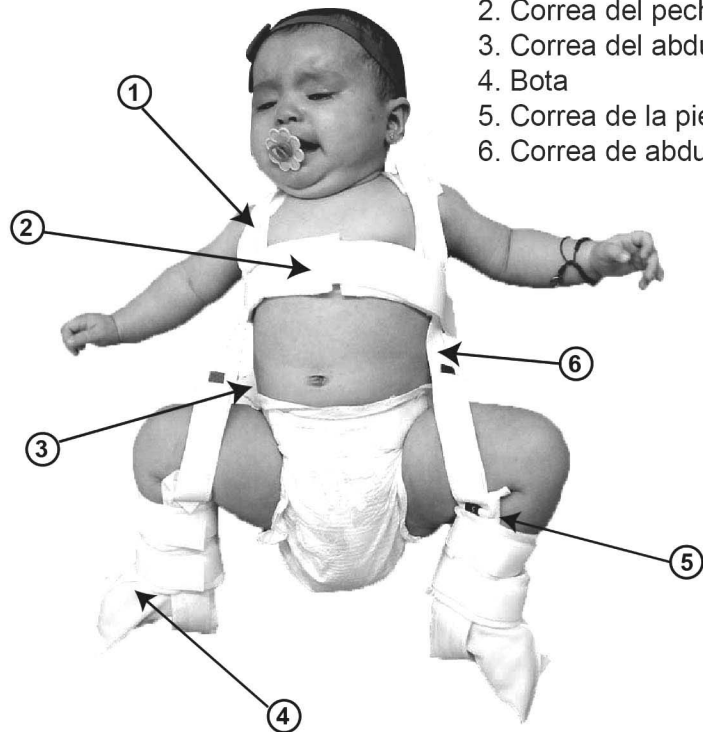

1. Correa del hombro
2. Correa del pecho
3. Correa del abducción
4. Bota
5. Correa de la pierna
6. Correa de abducción



### POLIZA DE GARANTÍA

Este producto esta garantizado contra defectos de fabricación por un periodo de 30 días a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones. Para hacer valida su garantía debe presentar: El empaque, el producto, póliza de garantía vigente y comprobante de venta. Si usted adquirio el producto con cualquier otro distribuidor haga valida su garantía con el mismo.


Health Group Industrias de México S.A. de C.V.  
Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México  
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002  
RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz

# MODO DE COLOCACIÓN FERULA DE PAVLICK

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y pregunte cualquier duda que tenga a su ortopedista pediatra



Primero colocar al bebe sobre el arnés previamente extendido. La/el bebé debe estar en una posición cómoda y segura.

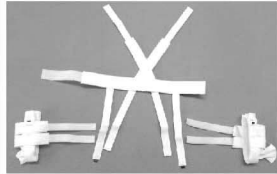

Se debe colocar la banda torácica a nivel del pecho sin apretar y mantenerla en dicha altura con los tirantes.

Nota: Las botas y tirantes tienen marcadores por color.



Posteriormente se colocaran los pies dentro de las botitas o estribos según sea el caso. Y fijarlos con sus velcros sin apretar.



Colocar las cintillas anteriores, para mantener la cadera flexionada no mas de  $100^\circ$  y se fijaran.

Nota: La hebilla medial debe alinearse con el cóndilo femoral medial.



Por ultimo se colocan las cintillas posteriores para mantener las piernas abiertas en un rango de  $45^\circ$ .



Las cintas laterales controlan la abducción y rotación, pero no dan abducción forzada.