

## INSTRUCCIONES DE USO

El estetoscopio es de doble cabeza, tiene un diafragma grande y uno pequeño y una válvula hermética de tubo.



1 Coloque los audífonos en las cavidades auditivas.



2 Un suave golpe al diafragma le permitirá saber si esta funcionando correctamente.



3 Si usted no escucha el sonido del golpe, gire la cabeza 180° hasta que oiga un clic para colocarlo en la posición adecuada.

4 Entonces, golpee una vez más y oirá los sonidos de los golpecillos, lo cual significa que el instrumento está funcionando correctamente.

5 ¡Ahora usted puede diagnosticar con el estetoscopio!

6 Vuelva a realizar el mismo procedimiento cuando cambie cada una de las piezas.



**PRODUCTOS MEDICOS,  
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**



## ESTETOSCOPIO PROFESIONAL DOBLE VALERIA 2001D

### CARACTERÍSTICAS:

Estructura y diseño del Disco auscultador con doble función , estetoscopio general y estetoscopio pediátrico, consta de Head frame ( Dispositivo auditivo ), viene en estructura metálica, tubo de látex, Chest Piece, (disco Auscultador).

Indicado para el diagnóstico auscultatorio, registrar diversos sonidos del corazón, pulmón y otros órganos del cuerpo humano

### GARANTÍA

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

PRECAUCIONES: No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la poliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

**Health Group Industrias de México S.A. de C.V.**  
Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México  
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002  
RFC: HG19711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz